

# RESPIRE +



## NOTICE D'UTILISATION

### MASQUE HYBRIDE FILTRE AMOVIBLE

PERFORMANCE + FILTRATION  
ACTIVITÉS INTENSES + MOBILITÉ URBAINE



FILTRATION DES PARTICULES FINES  
ANTI POLLUTION  
ANTI POLLEN  
ANTIBACTÉRIEN | ANTIVIRAL

TECHNOLOGIE BREVETÉE

FABRIQUÉ EN FRANCE



### INSTRUCTIONS D'UTILISATION :

Avant première utilisation nous vous conseillons de laver le masque à 40 degrés. Lavez-vous les mains avant chaque manipulation.

#### INSTALLER LE FILTRE :

TOURNER LE MASQUE SUR L'ENVERS



INSERER LE FILTRE CÔTÉ BLANC CONTRE LA GRILLE



#### METTRE SON MASQUE :

TOURNER LE MASQUE SUR L'ENDROIT



PLACER LE MASQUE SUR VOTRE VISAGE ET REGLER LES ELASTIQUES A L'AIDE DES STOPPEURS




#### INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN :



RETRIEVER LE FILTRE AVANT LAVAGE  
NE PAS LAVER LE FILTRE



PLACER LE MASQUE DANS UN FILET DE PROTECTION  
LAVER LE MASQUE A 40 DEGRES

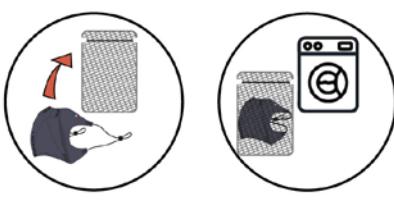

## INTRODUCTION

Notre masque RESPIRE + a été conçu pour vous accompagner dans toutes vos activités au quotidien. Ce masque hybride vous offre 2 utilisations possibles :

- Le masque seul vous protège durant vos activités sportives et professionnelles.
- Dans un environnement de plus en plus pollué, le masque avec son filtre amovible sera votre allié pour tous vos déplacements en milieu urbain.

## CARACTÉRISTIQUES

### MASQUE SEUL :

Son design moderne ainsi que ses cordons élastiques ajustables lui permettent de s'adapter facilement à toutes les morphologies. Sans couture, il offre un confort optimum au porter.

Il est composé d'un tissu léger et respirant 100% polyester et est doté d'une grille permettant une meilleure respirabilité, en gardant le tissu à distance de la bouche. Technologie brevetée.

Réutilisable et lavable 50 fois, ce masque est homologué pour une efficacité de filtration supérieure à 90% des particules de 3 microns, et en respect des tests de la note interministérielle du 29 Mars 2020 mise à jour le 28 Janvier 2021.

La respirabilité du masque a été mesurée à >96L./m2s-1 et permet son port pour une durée de 4 heures.

### MASQUE AVEC FILTRE :

Le filtre est composé de 3 couches distinctes :

- une couche au charbon actif qui absorbe les gaz et les odeurs
- une couche bactéricide qui arrête les bactéries contenues dans l'air
- une couche électrostatique qui capte les grosses particules (poussières, ...), les particules les plus fines pouvant mesurer jusqu'à 0.1 micron ainsi que les pollens. Ce filtre répond aux exigences de la catégorie 1 de la norme AFNOR. Ajouté au masque, il représente donc un atout supplémentaire et non négligeable au produit : Il vous protégera contre toutes sortes de particules, gaz, virus...

! Malgré le soin apporté à la fabrication de ce masque, il appartient au seul utilisateur, et en aucun cas au fabricant, de s'assurer de l'adéquation du masque avec les caractéristiques du milieu d'usage. Il convient cependant de suivre scrupuleusement les recommandations et modalités d'usage décrites dans cette notice.

1

2

## RECOMMANDATIONS

Le filtre étant amovible, veillez à l'installer correctement selon les instructions ci-dessus. Pour une efficacité optimale, veillez à le remplacer toutes les 4 semaines pour une utilisation de 3 heures par jour ou toutes les 2 semaines pour plus de 3 heures par jour. Vérifier son bon état avant chaque utilisation. Un filtre détérioré (trous, coupures...) n'assurera plus un niveau de filtration suffisant. Tout lavage du filtre altérera également son efficacité. Ce produit n'élimine pas complètement le risque de contracter des maladies ou infections.

! Ce masque ne remplace pas les gestes barrière (lavage des mains, distinction physique, réduction des contacts avec d'autres personnes) et il n'est pas destiné au personnel soignant.

Ce masque barrière n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (comme masque filtrant de type FFP2)

## COMPOSITION

Matière : 100% Polyester

Grille : 65% Polyester - 35% Polyuréthane

Filtre : Couches textiles - Charbon actif



## RECHARGES DE FILTRES DISPONIBLES SUR NOTRE SITE INTERNET

[www.rocle-health-protection.com](http://www.rocle-health-protection.com)

**ROCLE**  
HEALTH PROTECTION

ROCLE HEALTH PROTECTION  
10 Boulevard Garibaldi  
69170 TARARE - France